

# KiILTO PRO



# Specialrengöringsmedel KiILTO Pro Erinox

KiILTO Pro Erinox är ett specialrengöringsmedel avsett för manuell tvätt av instrument inom sjukvården, för ultraljudstvättar och för tvättning av flexibla och styva endoskop. Lämplig även för känsliga instrument och material.

## INSTRUKTIONER FÖR UTSPÄDNING

Förbered utspädningen enligt instruktionerna separat för varje underhållsprocedur. Skölj och torka den tvättade utrustningen.

**Vid behov, desinficera utrustningen före tvätt!**


	%	Erinox	vatten	notera!
Ultraljudstvätt	2 %	20 ml	980 ml	Byt ut den utspädda vätskan 1 till 2 gånger om dagen. Temperatur max. 50°C
Manuell tvätt: endoskop och annan utrustning	2 %	20 ml	980 ml	Förbered ny utspädning för varje underhållsprocedur



## RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV FLEXIBLA ENDOSKOP

Flexibla endoskop måste rengöras omedelbart efter användning. Förrengöring, borstning och tvätt av endoskop är de mest kritiska stegen i rengöringsprocessen. Kom ihåg skyddskläder: ta på dig ett vattentätt förkläde, skyddshandskar och vid behov mun-, näs- och ögonskydd.


### MANUELL RENGÖRING I STERILRUMMET:

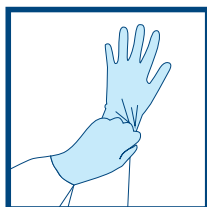

**1.** Ta på dig nödvändiga skyddskläder. Behåll dem på under hela städningen och desinfektionen och byt till nytt vid behov.



**2.** Förbered i bassängen en 2% Erinox-lösning; 10 ml KiILTO Pro Erinox specialrengöringsmedel / 0,5 l vatten (ca 30 °C).

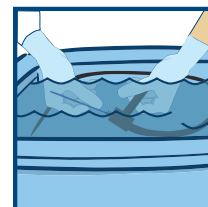

**3.** Utför kanalläckagetestet före borstning. Borsta kikarsikten kanalerna grundligt, med endoskopet nedsänkt i tvättlösningen. Undvik stänk.